

Caricabatterie MioCardio Event

MANUALE D'USO

STEP 1

Inserire il Caricabatteria alla presa elettrica.
I due LED del caricabatteria saranno entrambi di colore verde



STEP 2


Inserire il cavo del Caricabatteria alla porta USB del MioCardio Event.
I due LED del caricabatteria saranno entrambi di colore rosso



Dopo che il cavo del caricabatterie è stato inserito nella porta USB del MioCardio Event il LED del device inizierà a lampeggiare. A questo punto si dovrà spingere il tasto di accensione che farà diventare acceso in maniera fissa il LED del MioCardio Event. Tale status indicherà che è iniziata la carica del device in maniera corretta.

Vedi video dimostrativo in Devices/Miocardio Event.

Durante la carica del device uno dei LED del caricabatteria diventerà di colore verde (stato di carica intermedio)

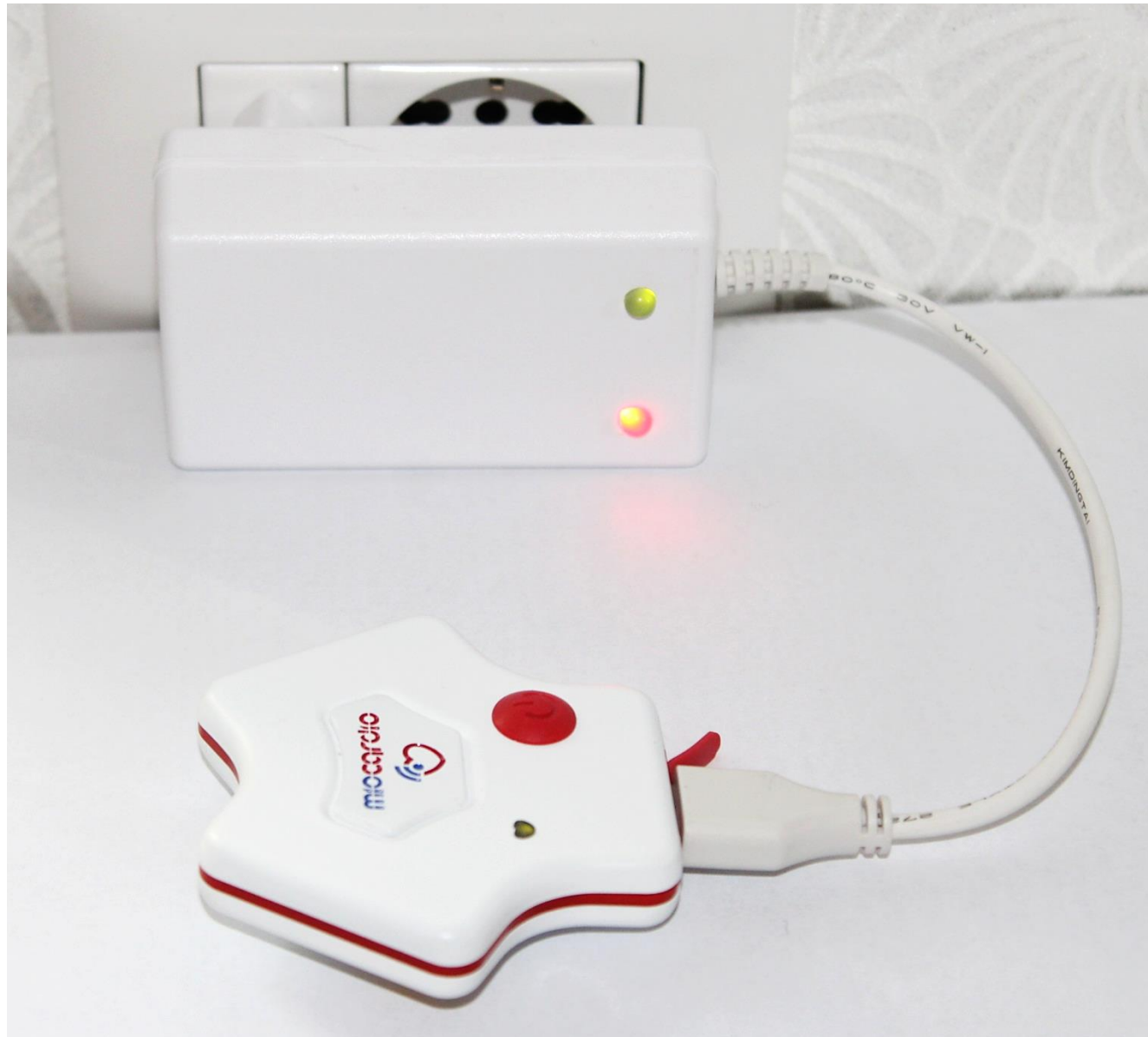

Quando il MioCardio Event sarà completamente carico entrambi i LED del caricabatterie diventeranno di colore verde

