



**Come eseguire il Download del
Software**

MioCardio Explorer

Guida rapida all'uso

STEP 1

Connettersi al sito web www.miocardio.net e digitare «MioCardio Explorer» dalla sezione «Devices»

Via L. Muratori, 19 C - 00012 Guidonia (RM) - IT | support@miocardio.net



Home

MioCardio

Devices

Info per Medici

Supporto

Contatti

Shop



MioCardio Event

MioCardio Belt

Accessori

MioCardio Viewer (APP)

MioCardio Explorer

Medical Services

MIOCARDIO EVENT

LA PREVENZIONE A PORTATA DI MANO.

SCOPRILO



STEP 2

Digitare «DOWNLOAD»

Via L. Muratori, 19 C - 00012 Guidonia (RM) - IT | support@miocardio.net



[Home](#)

[MioCardio](#)

[Devices](#)

[Info per Medici](#)

[Supporto](#)

[Contatti](#)

[Shop](#)



MIOCARDIO EXPLORER

Per sistemi operativi Windows/Mac OS/Linux

[Devices](#) / [MioCardio Explorer](#)

MioCardio Explorer è il software che permette di visualizzare i file presenti sulle memorie SD degli apparecchi elettromedicali prodotti da MioCardio (MioCardio Event e MioCardio Belt) e inviarli al server MioCardio dedicato.

MioCardio Explorer - Windows 10/8.1/8/7/Vista 32/64 bit

[DOWNLOAD](#)

MioCardio Explorer - Mac OS X 10.9 o versioni successive

[A BREVE DISPONIBILE](#)

MioCardio Explorer - Linux

[A BREVE DISPONIBILE](#)

STEP 3

Inserire le proprie credenziali per installare sul PC il Software MioCardio Explorer

Via L. Muratori, 19 C - 00012 Guidonia (RM) - IT | support@miocardio.net



[Home](#)

[MioCardio](#)

[Devices](#)

[Info per Medici](#)

[Supporto](#)

[Contatti](#)

[Shop](#)



LOGIN

Inserisci le tue credenziali di accesso e poi clicca sul pulsante ACCEDI

[MioCardio / Login](#)

ACCEDI


REGISTRATI

Ricordami

ACCEDI

[Password dimenticata](#)


STEP 4





























[Home](#)[MioCardio](#)[Devices](#)[Info per Medici](#)[Supporto](#)[Contatti](#)[Shop](#) [Pietro Rossi](#)


I TUOI FILES

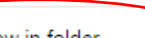Lista

MioCardio / Files

 Le tue registrazioni ECG

Nome	Data di upload	Tipo	Referto medico	In refertazione dal	Elimina
	03/12/2017			11/02/2018	
	03/12/2017			-	
	03/12/2017			-	
	21/12/2017			-	
	21/12/2017			-	
	21/12/2017			-	
	21/12/2017			21/12/2017	

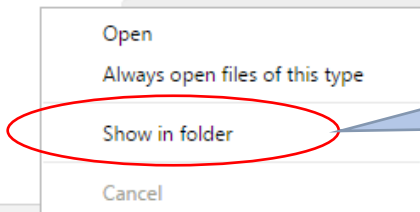

Fare un click sull'icona «Show in folder»

STEP 5

The image shows a Windows File Explorer window. On the left is the navigation pane with 'Preferiti' (Desktop, Download, Dropbox, Risorse recenti) and 'Raccolte' (Documenti, Immagini, Musica, Video) sections. Below these are 'Gruppo home' and 'Computer' (OS (C:), HP_RECOVERY (D:)). The main pane shows a file list with columns for 'Nome', 'Tipo', and 'Dimensione'. The file 'MioCardio Explorer Setup (1)' is selected and highlighted in blue. A blue callout bubble points to its icon with the text 'Fare un doppio click sull'icona evidenziata'. A tooltip is visible over the file, displaying the following information:


Nome	Tipo	Dimensione
[Redacted]	Documento PDF	38 KB
[Redacted]	Documento PDF	202 KB
[Redacted]	Documento PDF	699 KB
[Redacted]	File JPG	149 KB
MioCardio Explorer Setup (1)	Applicazione	67.995 KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted] KB

Descrizione del file - MioCardio Explorer (MioCardio.net Installer) KB
Società - MioCardio KB
Versione file - 3.0.0.0 KB
Data creazione - 14/02/2018 22:11 KB
Dimensione - 66,4 MB KB


STEP 6

Installare localmente il software



Ultima modifica	Tipo	Dimensione
05/07/2017 17:50	Documento PDF	567 KB
27/04/2017 21:58	File JPG	122 KB
08/11/2017 22:51	File JPG	45 KB
17/06/2017 23:26	Documento PDF	106 KB
11/08/2012 11:16	Archivio WinRAR ...	2.558 KB
26/05/2017 18:36	Documento PDF	407 KB
27/04/2017 21:54	File JPG	131 KB
13/09/2014 18:04	Archivio WinRAR ...	18.993 KB
04/12/2016 19:12		
04/12/2016 19:12		
04/12/2016 19:12		
09/09/2013 14:39		
27/11/2014 22:48		
27/09/2017 17:33		
26/06/2017 21:56		
24/06/2017 17:53		
17/03/2017 21:12		
19/03/2017 17:57		
17/03/2017 21:10		
19/03/2017 17:58		
17/03/2017 18:07		
14/03/2017 13:00		
03/07/2017 22:55	Documento PDF	18.983 KB
08/07/2017 20:26	Documento PDF	18.687 KB
18/07/2017 23:00	Documento PDF	18.687 KB
17/03/2017 21:09	Documento di Mi...	317 KB

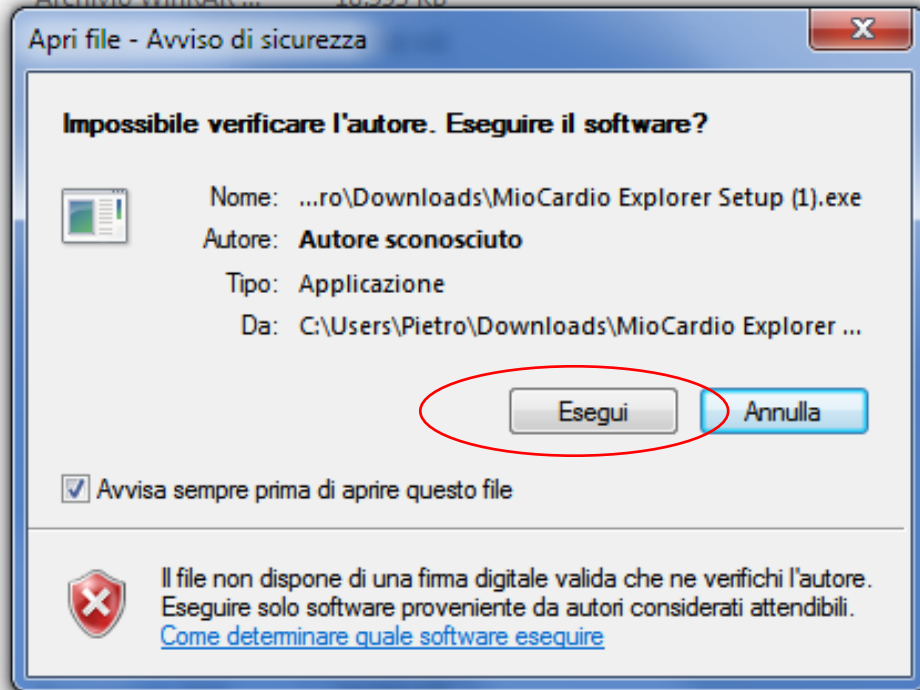

05/07/2017 17:50	Documento PDF	567 KB
27/04/2017 21:58	File JPG	122 KB
08/11/2017 22:51	File JPG	45 KB
17/06/2017 23:26	Documento PDF	106 KB
11/08/2012 11:16	Archivio WinRAR ...	2.558 KB
26/05/2017 18:36	Documento PDF	407 KB
27/04/2017		
13/09/2014		
04/12/2016		
04/12/2016		
04/12/2016		
09/09/2013		
27/11/2014		
27/09/2017		
26/06/2017		
24/06/2017		
17/03/2017		
19/03/2017		
17/03/2017		
19/03/2017		
17/03/2017		
14/03/2017		
03/07/2017		
08/07/2017		
18/07/2017		
17/03/2017 21:09	Documento di Mi...	317 KB
17/03/2017 23:14	Documento di Mi...	322 KB
19/03/2017 17:59	Documento di Mi...	310 KB

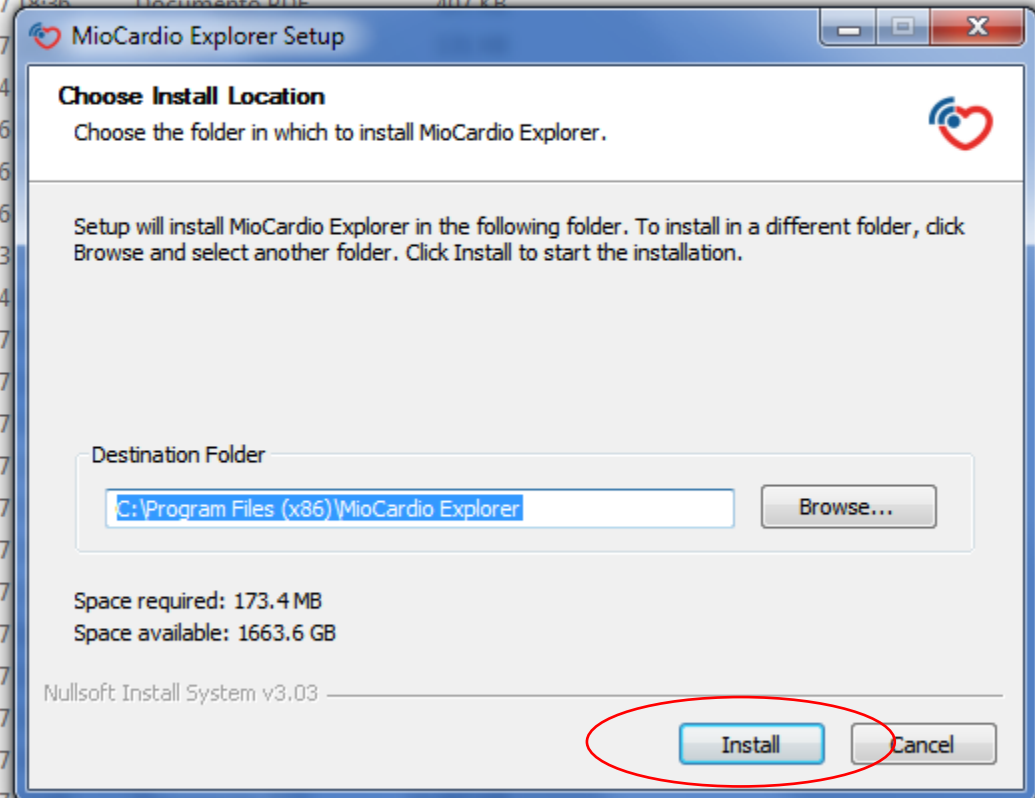

STEP 7

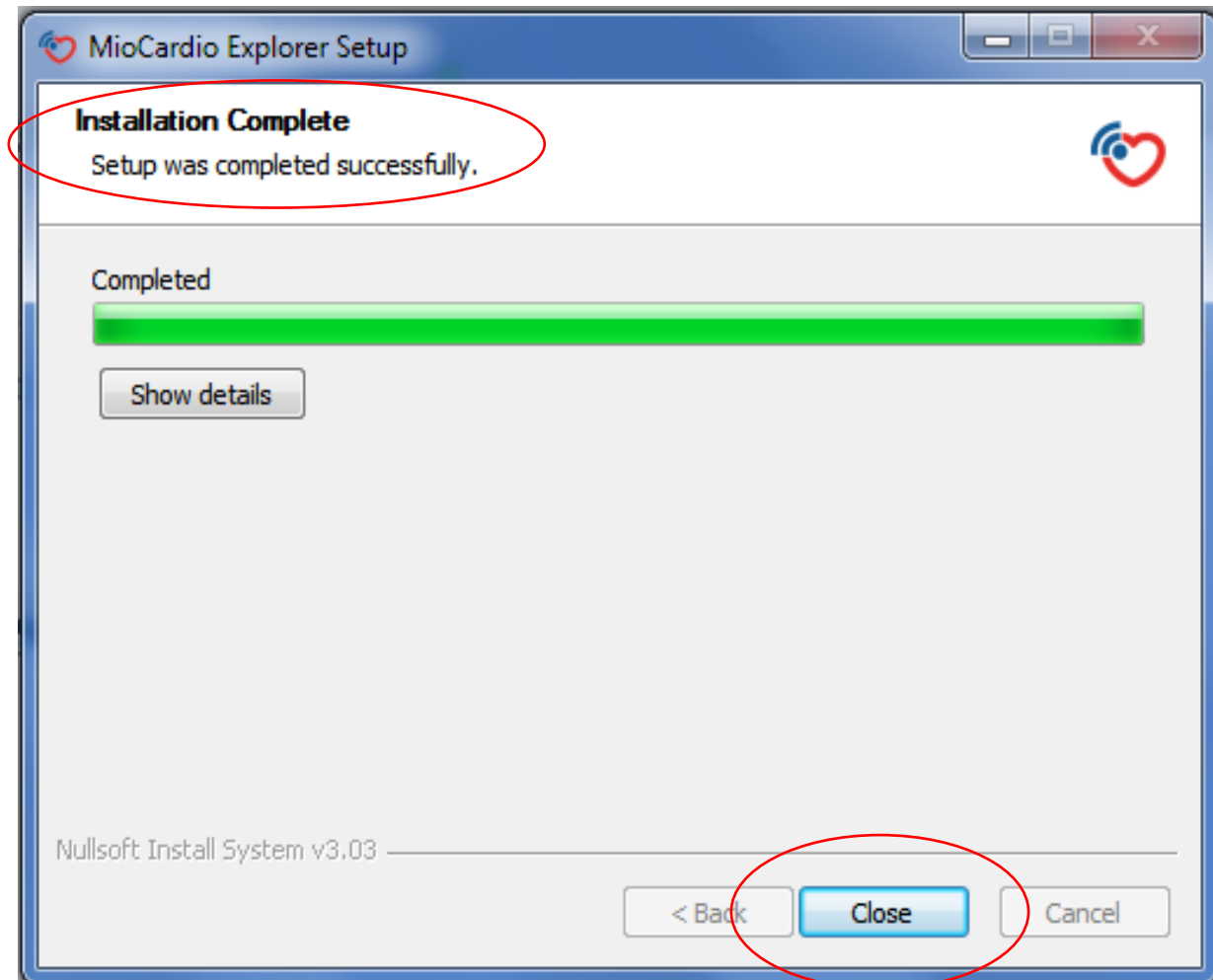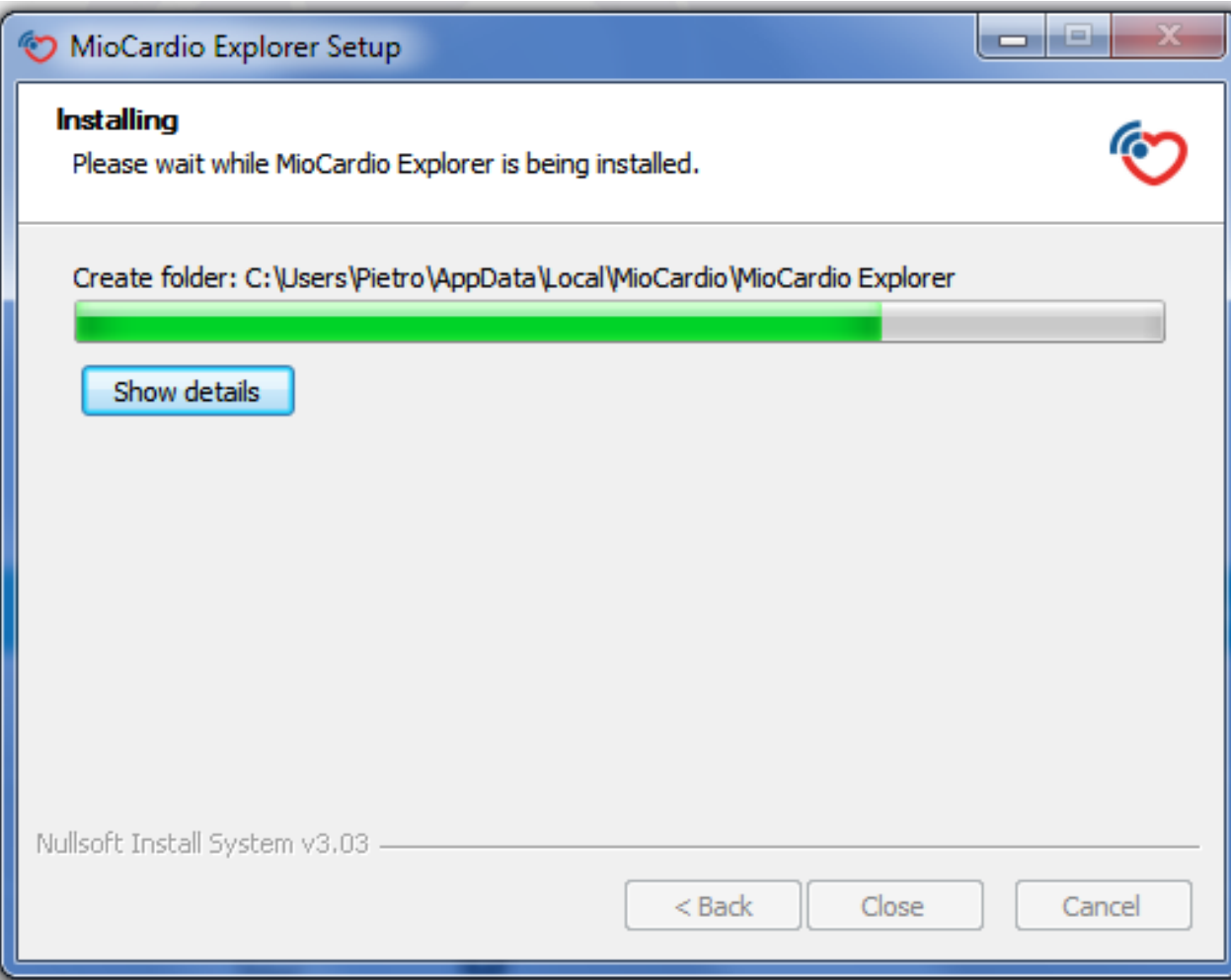



Tasto/Icona per avviare il software MioCardio Explorer



Connettere lo strumento MioCardio al PC

Step 1: inserire l'estremo USB tipo 3 del cavo dedicato MioCardio (in dotazione nella confezione) all'interno della porta USB del Device MioCardio Event



Step 2: inserire l'estremo USB tipo 2 del cavo MioCardio in dotazione all'interno della porta USB del PC


Dopo la connessione al PC tramite il cavo, il LED del Device lampeggerà velocemente per tre volte e poi rimarrà acceso in modalità fissa



«Avviare» il software MioCardio Explorer per inviare i dati ECG dello strumento Miocardio alla propria cartella personale accessibile tramite il sito www.miocardio.net





MioCardio Explorer



Safe Heart. Our mission.

Login

 Email

 Password

[Ho dimenticato la password](#)

Login

Inserire le proprie
credenziali per caricare i
file degli strumenti
MioCardio




MioCardio di

[Logoff](#)

Nome file ▲	Utente	Dimensione	Data	Upload
MCrd0_1.ecg	wal***.s*****@g***...	32 Kb	20/10/2017	Caricato
MCrd1_1.ecg	wal***.s*****@g***...	15 Kb	1/11/2017	Caricato
MCrd2_1.ecg	ste*****@g***.c**	5760 Kb	████████	Caricato
MCrd5_1.ecg	wal***.s*****@g***...	16 Kb	████████	Caricato
MCrd6_1.ecg	tes*****@m*****...	5760 Kb	████████	Caricato

Indicazione dell'avvenuta spedizione sul Server per ogni singolo file.

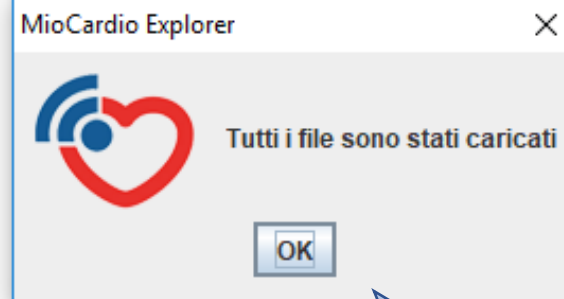

Banner indicante l'avvenuto caricamento di tutti i files sul Server

Sincronizzazione eseguita